

Procesgangen en type machine welke gebruikt wordt voor de machinale reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen binnen de CSA.

Type machine: Miele PG8528 GGT

Programma opbouw:

1. Voorspoelen: 3 minuten met koud onthard water
2. Reinigen: 5 minuten, 0.5% Mediclean forte (firma dr. Weigert), 45°C + 5 minuten bij 55°C (waterkwaliteit onthard water)
3. Spoelen: 2 minuten met verwarmd onthard water
4. Spoelen: 2 minuten met gedemineraliseerd water
5. Desinfectie: 5 minuten, 93°C, gedemineraliseerd water
6. Drogen: 20 minuten 110°C

OF

Programma opbouw:

1. Voorspoelen: 3 minuten met koud onthard water
2. Reinigen: 5 minuten, 0.5% Medizym (firma dr. Weigert), 45°C (waterkwaliteit onthard water)
3. Spoelen: 2 minuten met verwarmd onthard water
4. Spoelen: 2 minuten met gedemineraliseerd water
5. Desinfectie: 5 minuten, 93°C, gedemineraliseerd water
6. Drogen: 20 minuten 110°C