

adviesformulier (Infectiepreventie)

behorende bij: LO-0028, Unit Infectiepreventie

ALGEMEEN	
adviesnummer	A-170704
datum aanvraag	13-06-2017
datum verzonden	06-07-2017
naam aanvrager	D. Schot-Oevermans
afdeling aanvrager	Neonatologie
functie aanvrager	Zorgassistent
e-mailadres aanvrager	n.oevermans@erasmusmc.nl
naam opsteller	Jitske Oeyen
deskundige infectiepreventie	
naam mede opsteller	prof. dr. M.C. Vos
arts-microbioloog	
onderwerp advies	Reiniging en desinfectie couveuses

VRAAGSTELLING

De afdeling Neonatologie vraagt om advies omtrent de reiniging en desinfectie van de couveuses na gebruik bij strikte isolatie van MRSA-positieve patiënten.

ADVIES UNIT INFECTIEPREVENTIE

In de richtlijn "[Bedden en toebehoren](#)"¹ staat het volgende over het reinigen en desinfecteren van bedden gebruikt bij contact- en strikte isolatie:

2.4 Reiniging en desinfectie van bedden gebruikt bij contact- en strikte isolatie

Bedden gebruikt bij contact-en strikte isolatie worden eerst handmatig gereinigd op de isolatiekamer door de verpleegafdeling.

- Na de reiniging worden de bedden gedesinfecteerd met chloor 250 ppm.
- Indien er sprake is van besmetting met bloed wordt na reiniging het bed gedesinfecteerd met 1000 ppm chloor.
- Na handmatige reiniging dient het bed alsnog machinaal gereinigd te worden.

De couveuses zijn echter niet bestand tegen chloor en zij worden ook niet machinaal gereinigd. De fabrikant Dräger heeft bevestigd dat er voor de desinfectie gebruik gemaakt mag worden van Incidin® OxyFoam en OxyWipe (tot voor kort bekend als Aseptix Sterimax).

Incidin® OxyFoam
Incidin® OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und
Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂



N.B.: Dit advies is afgegeven voor de spraken of oneigenlijk worden geïnterpreteerd. We adviseren u bij twijfel over de

adviesformulier (Infectiepreventie)

behorende bij: LO-0028, Unit Infectiepreventie

De Unit Infectiepreventie adviseert om de couveuse te reinigen met een klamvochtige microvezeldoek en te desinfecteren met Incidin® OxyFoam alvorens deze de isolatiekamer verlaat (zie onderstaande instructie). De instructie is te vinden in de richtlijn "[Reiniging en desinfectie](#)"² onder de hyperlink "Poster desinfectie met aseptixs ([PO-0180](#))"³

Instructie:	
1.	Reinig de couveuse met een klamvochtige microvezeldoek.
2.	Pak een nieuw disposable microvezeldoek en spuit hierop een hoeveelheid OxyFoam.
3.	Wrijf krachtig over het te desinfecteren oppervlak, zodanig dat alles vochtig is en blijft gedurende 5 minuten. Werk hierbij "van schoon naar vuil".
4.	Werp het doekje na gebruik in de afvalbak.
5.	Laat de foam aan de lucht opdrogen, dan heeft het na 5 minuten zijn desinfecterende werking gedaan.

LET OP!

- Gebruik per voorwerp/ruimte een nieuw doekje.
- Bij het openen van een nieuwe verpakking moeten de datum waarop de flacon geopend wordt en de vervaldatum (3 maanden later) op de verpakking worden geschreven.
- Een eenmaal geopende flacon mag maximaal 3 maanden gebruikt worden.
- Flacons die aangetroffen worden zonder vermelding van de open- en vervaldatum dienen direct weggegooid te worden. De desinfecterende werking kan dan niet meer gegarandeerd worden.
- De flacon is niet navulbaar.

Als alle onderdelen van de couveuse droog zijn kan deze de isolatiekamer verlaten en de reguliere schoonmaakprocedure doorlopen.

ACTIES

Benodigde materialen kunnen besteld worden a.h.v. de volgende gegevens:

artnr.	leverancier	omschrijving	besteleenheid
59105	King	Microvezeldoek microroll	Rol 200 vel
59114	King	Dispenser voor microvezeldoek	1 stuk
3080300	Microtek medical BV	Aseptix Sterimax foamspray	6 flacons à 750ml

RICHTLIJN / NORM / LITERATUUR

1. [ZH031RICHT](#) Richtlijn bedden en toebehoren
2. [ZH018RICHT](#) Reiniging, desinfectie van oppervlakken, meubilair, hulpmiddelen en apparatuur
3. [PO-0180](#) Poster desinfectie met aseptixs

N.B.: Dit advies is afgegeven voor de specifiek in dit advies opgenomen vraag-/probleemstelling en mag niet geëxtrapoleerd worden naar andersoortige situaties of oneigenlijk worden geïnterpreteerd. Het is afgegeven onder voorbehoud van wijziging van wet-/regelgeving dan wel nieuwe (wetenschappelijke) inzichten. We adviseren u bij twijfel over de juistheid / geldigheid van dit advies contact op te nemen met de unit Infectiepreventie o.v.v. het adviesnummer.