

## **Bijlage A: Opwerkprotocol Zelfafnameset**

1. Klaarzetten spullen, waaronder een schone pincet, en aandoen van handschoenen.
2. Vul de pot met medium (deze kan door het Screeningslaboratorium ook voorgevuld zijn).
3. Haal de blister met de Evalyn Brush uit de lekvrije verpakking. Gooi de lekvrije verpakking weg.
4. Haal het device uit de blister en leg de blister op de werktafel.
5. Scan de Evalyn Brush, print barcode sticker uit en plak barcode sticker op pot.
6. Haal de dop van de pot en leg deze zodanig weg dat deze niet gecontamineerd kan raken.
7. Haal de roze dop van de Evalyn Brush en gooi deze weg.
8. Druk boven de buis de roze draaiknop van het device richting de doorzichtige buis tot deze vastklikt. Hierdoor komt de borstel naar buiten.
9. Neem de schone pincet en neem hiermee de witte borstel af en doe deze in de klaarstaande pot.  
Leg de pincet op de lege blister.
10. Gooi de rest van het device, de blister en pincet weg.
11. Doe de dop op de pot.
12. Vortex de pot gedurende 2 x 15 seconden.
13. Plaats de pot in een rek.

### **NB**

In het gefilmde proces start de opname op het moment dat de handschoenen al aan zijn getrokken en alle spullen reeds klaarstaan. Daarnaast zijn de monsterpotten voorgevuld door het screeningslaboratorium